



fluorecare®

SARS-COV-2 Spike Protein Test Kit



Kit Determinare ANTIGEN Covid-19

Kit-ul FLUORECARE ANTIGEN COVID 19 este complet și ușor de folosit, se utilizează pentru detectarea calitativă în 15 minute a Antigenului Covid 19 (Proteina Spike).

fluorecare® SARS-COV-2 Spike Protein Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) conține 25 de teste per kit.

- ✓ Detectare ANTIGEN COVID-19
- ✓ Sensibilitate 91.30%
- ✓ Specificitate 100%
- ✓ Marcaj CE
- ✓ Aviz Ministerul Sănătății - ANMDM

Informații Produs

Casete de testare	25 Bucăți
Soluție buffer individuală	25 Bucăți
Tampoane sterile nazale	25 Bucăți
Eprubete de extracție	25 Bucăți
Capace cu filtru și picurător	25 Bucăți

Producător:

 Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd.

Importator / Distribuitor:

 Canori Systems SRL

Contact:

 0744336655 | 0728366993

 canorisystems@gmail.com

PROCEDURA DE LUCRU

Fluorecare[®] kit pentru determinarea SARS-CoV-2 Proteina Spike (test rapid imunocromatografic cu aur coloidal)

1

Pentru probe

1.1 Ilustrație de prelevare (Tampon nazofaringian)



1. Dați capul pacientului ușor pe spate și prelevați proba din nara care are mai mult mucus (capul ar trebui să fie înclinat din poziția verticală pentru colectarea corectă a probelor).
2. Introduceți tamponul prin nară și mișcați-l încet de-a lungul fundului cavității nazale (faceți mișcări lente pentru a evita sângerările traumatiche).
3. Când vârful tamponului atinge peretele posterior al cavității nazofaringiene, rotiți-l ușor de câteva ori. (Colectați cât mai multă secreție posibil)
4. Pentru a preveni tusea reflexă, opriți-vă un minut.
5. Scoateți încet tamponul.
6. Analizați proba cât mai curând posibil

1.2 Aplicarea probei



1 Adăugați 300µL soluție de tratament (buffer) în eprubeta de extracție

2 Strangeti eprubeta și rotiți tamponul de 10 ori.

3 Îndepărtați tamponul și puneți capacul cu filtru și picurator.


4 Adăugați 2 picături din probă, în orificiul probei apoi așteptați 15 minute pentru reacție la temperatura camerei

3

Citiți rezultatul



Pozitiv

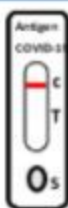

Negativ



Neconcludent



fluorecare®
COVID-19
Antigen

C
T

S

